

medentis
medical

ICX

THE FAIR
PREMIUM
IMPLANT
SYSTEM.



ZAAWANSOWANY SYSTEM IMPLANTOLOGICZNY NAJWYŻSZEJ KLASY

- Szeroka gama implantów z czystego tytanu IV klasy
- Wysoka hydrofilowość i mikroporowatość powierzchni implantów
- Nowoczesne rozwiązania protetyczne
- 100% cyfrowy workflow i proste protokoły

**Wyłączny dystrybutor
systemu implantologicznego ICX w Polsce**



Medical Smart
Solutions

IMPLANT ICX

Stożkowa śruba w pełni zabezpiecza łącznik protetyczny przed poluzowaniem

Zastosowanie tytanu IV klasy czystości, opracowanego na zimno, zapewnia wysoką biokompatybilność oraz najwyższą odporność na pękanie i rozciąganie (również wąskich implantów ICX)

Platform switching zapewnia długoterminowe utrzymanie poziomu kości wokół implantu

Krawędzie tnące na całej wysokości implantu ICX-Active

Cylindryczny kształt implantu ICX-Active pozwala na łatwe wprowadzenie w twardej kości, dzięki liniowo narastającemu momentowi obrotowemu podczas wprowadzania. Łagodnie zakończony wierzchołek implantu, optymalny do procedur Sinus Lift

Szeroki wachlarz rozwiązań protetycznych z możliwością wyboru wysokości przedziąsłowej łączników od 0-6 mm, a także wysokości komina protetycznego, jego szerokości, kątowości i kształtu



Ta sama platforma protetyczna dla średnic 3,45 mm, 3,75 mm, 4,1 mm, 4,8 mm.

Głębokie, precyzyjne, konikalne połączenie implantu z łącznikiem, oznacza brak mikroruchów i pełną szczelność, a także brak mikro-pompy bakteryjnej

Hexagon o wysokości 1,5 mm, dla dodatkowej antyrotacji i stabilności połączenia

ICX-Premium to uniwersalne implanty przeznaczone do wszystkich wskazań. Mikrogwint w obszarze przyszyjkowym zapewnia znacznie lepsze utrzymanie poziomu kości korowej oraz rozłożenie sił powodujących przeciążenia i naprężenia. Subkrestalne umieszczenie implantu zapobiega zanikowi kości brzeżnej

Wysoka hydrofilowość powierzchni.

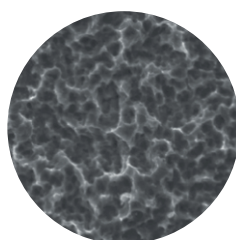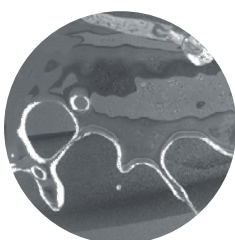

Wysoka mikroporowość powierzchni piaskowanej grubym ziarnem i wytrawianej w kwasach na gorąco, oferuje bardzo dobrą osteointegrację.

ICX to niemiecki system implantologiczny zaprojektowany z myślą o maksymalnej stabilności biologicznej, prostocie protokołów klinicznych oraz długoterminowej ochronie kości brzeżnej.

Każdy element systemu ICX powstał w odpowiedzi na realne potrzeby lekarzy implantologów – od umieszczenia implantu, przez protetykę, aż po utrzymanie efektów leczenia przez lata.



Jedna platforma protetyczna dla wszystkich implantów ICX o średnicy 3.45, 3.75, 4.1, 4.8

	ICX scan body do skanowania wewnątrzustnego i na modelach 2. generacji		ICX-Cerec® baza tytanowa 2,5mm, dla systemu Cerec® L-Block, z hex, zawiera czapeczkę do skanowania
	ICX łącznik tymczasowy z hex, Ø 4.7mm		ICX-MULTI łącznik prosty 3mm
	ICX łącznik tytanowy prosty, długi, standard, Ø 5mm		17° ICX-MULTI łącznik kątowy z hex, 2.5mm
	ICX łącznik tytanowy estetyczny, prosty, 3mm 0°		35° ICX-MULTI łącznik kątowy z hex, 1.5mm łącznik typu lokator może być zakładany na multiunity
	ICX łącznik tytanowy kątowy, 2,5mm 15°		ICX-t-bona łącznik kulowy, 3mm, średnica kuli: Ø 2.25mm
	ICX łącznik tytanowy kątowy, 2,5mm 25°		ICX-Maximus łącznik, prosty 3mm, jednoczęściowy
	łącznik ICX CrCo do napalania z tuleją modelującą kanał protetyczny, z hex		ICX Zero Bone Loss baza tytanowa, Ø4.4, GH=3.5mm, f.H=6mm

Implanty **ICX-PREMIUM**

ICX-PREMIUM

Uniwersalne implanty przeznaczone do szerokiego spektrum wskazań klinicznych. Mikrogwint w obszarze przyszyjkowym zapewnia znacznie lepsze utrzymanie poziomu kości oraz niweluje przeciążenia i naprężenia wokół implantu podczas jego wprowadzania w twardej kości.



ZOBACZ
CERTYFIKAT:



Implanty ICX-PREMIUM (BL) **różowe**, Ø 3,3mm

Nr artykułu

C-001-330080	ICX-PREMIUM Ø 3.3mm x 8mm
C-001-330100	ICX-PREMIUM Ø 3.3mm x 10mm
C-001-330125	ICX-PREMIUM Ø 3.3mm x 12.5mm

Ø 3,3mm




Implanty ICX-PREMIUM (BL) **czerwone**, Ø 3,75mm

Nr artykułu

C-001-390080	ICX Ø 3,75 x 8mm
C-001-390100	ICX Ø 3,75 x 10mm
C-001-390125	ICX Ø 3,75 x 12,5mm
C-001-390150	ICX Ø 3,75 x 15mm

Ø 3,75mm

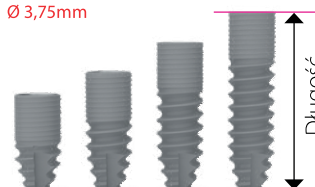


Implanty ICX-PREMIUM (BL) **zielone**, Ø 4,1mm

Nr artykułu

C-001-425080	ICX Ø 4,1 x 8mm
C-001-425100	ICX Ø 4,1 x 10mm
C-001-425125	ICX Ø 4,1 x 12,5mm
C-001-425150	ICX Ø 4,1 x 15mm

Ø 4,1mm

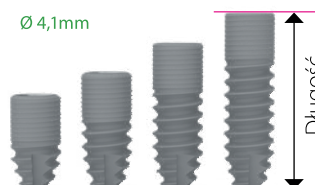


Implanty ICX-PREMIUM (BL) **niebieskie**, Ø 4,8mm

Nr artykułu

C-001-480080	ICX Ø 4,8 x 8mm
C-001-480100	ICX Ø 4,8 x 10mm
C-001-480125	ICX Ø 4,8 x 12,5mm
C-001-480150	ICX Ø 4,8 x 15mm

Ø 4,8mm

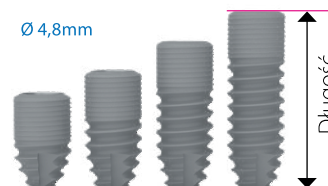

Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Akwizgranie przez prof. dr Murat Yildirim, potwierdzają skuteczność systemu ICX na poziomie **99,27%**.


Sukcesy i straty:

Łącznie: **413**

Utracone: **3**

In situ: **410**

Wskaźnik sukcesu: 99,27%

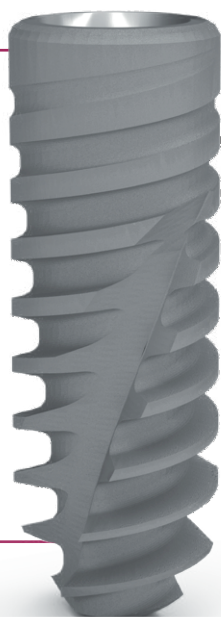

Implanty **ICX-ACTIVE**

ICX-ACTIVE


Implanty ICX-Active oferują bardzo dużą elastyczność w zakresie implantacji i możliwości odbudowy protetycznej. Dzięki specjalnej geometrii gwintu, każdy obrót ICX-Active w głąb kości powoduje stopniowe jej zagęszczanie. Specjalnie zaprojektowany wierzchołek implantu umożliwia – w razie potrzeby – niewielką korektę w ustawieniu implantu w trakcie wprowadzania. Implant dedykowany do implantacji natychmiastowych i obciążeń natychmiastowych. ICX-ACTIVE, ICX-PREMIUM oraz ICX-FAT BOYS posiadają tę samą platformę protetyczną.

Implanty ICX-ACTIVE-MASTER (BL) **różowe**, Ø 3,3mm

Nr artykułu

ACM-001-330080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm x 8mm
ACM-001-330100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm x 10mm
ACM-001-330125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm x 12.5mm

Ø 3,3mm

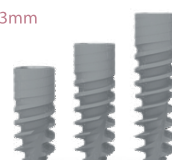


Implanty ICX-ACTIVE-MASTER **czerwone**, Ø 3,75mm

Nr artykułu

S-ACM-001-390080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 x 8mm
S-ACM-001-390100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 x 10mm
S-ACM-001-390125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 x 12,5mm
S-ACM-001-390150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 x 15mm

Ø 3,75mm

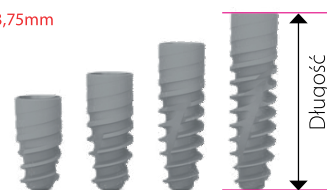


Implanty ICX-ACTIVE-MASTER **zielone**, Ø 4,1mm

Nr artykułu

S-ACM-001-425080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 x 8mm
S-ACM-001-425100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 x 10mm
S-ACM-001-425125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 x 12,5mm
S-ACM-001-425150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 x 15mm

Ø 4,1mm

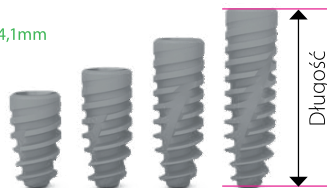


Implanty ICX-ACTIVE-MASTER **niebieskie**, Ø 4,8mm

Nr artykułu

S-ACM-001-480080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 8mm
S-ACM-001-480100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 10mm
S-ACM-001-480125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 12,5mm
S-ACM-001-480150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 15mm

Ø 4,8mm

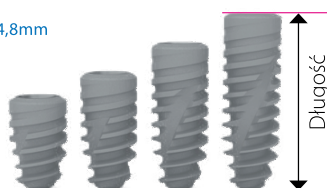


Implanty ICX-ACTIVE-MASTER **FAT BOYS**

Ø 5,5 / 6,2mm

ICX-ACTIVE-MASTER · L 8mm

ICX-ACTIVE-MASTER · L 10mm

ICX-ACTIVE-MASTER · L 12,5mm

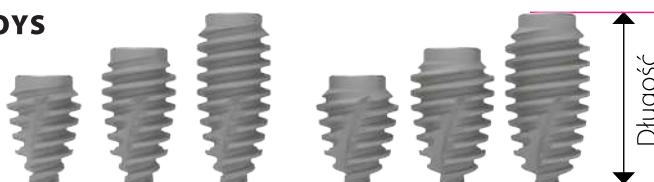





Szablony chirurgiczne proste i złożone

W laboratorium protetycznym Openlab 3Z przygotowujemy następujące typy szablonów:


- oparte na zębach (najczęściej stosowane),
- oparte na śluzówce,
- oparte na kości.

Szablony mogą być pinowane do kości w celu uzyskania ich stabilności.

Szablony występują w wersji prostej oraz składanej i są wykorzystywane do:

- precyzyjnego nawiercania i wprowadzania implantów,
- pozycjonowania następnych szablonów w odniesieniu do zębów / kości / śluzówki,
- redukcji / wyrównania kości wyrostka, implantacji, zwłaszcza natychmiastowej,
- eksplantacji,
- zabiegów regeneracji,
- osadzania uzupełnień tymczasowych,
- zastosowań indywidualnych.

Szablony składane oparte są na konektorach magnetycznych i pinach ustalających.

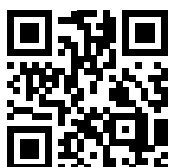


ICX-MAGELLAN


PROTOKÓŁ WIERCENIA ORAZ PRZYKŁAD UŻYCIA:




Protokół wiercenia – ICX-MAGELLAN z implantem $\varnothing$ 3.75 x 12.5mm

Implant $\varnothing$ 3,75 x 12,5mm

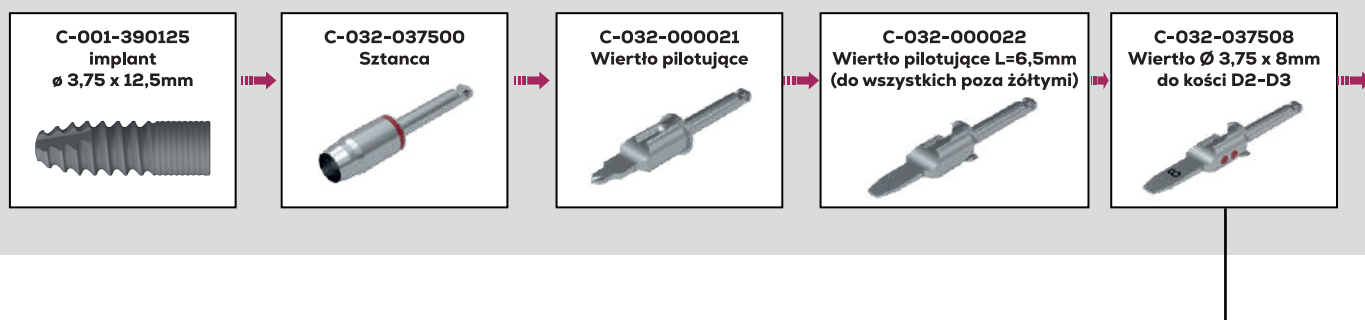

Wyjaśnienia przykładu użycia – sposób postępowania można zastosować dla wszystkich średnic implantów oraz gęstości kości

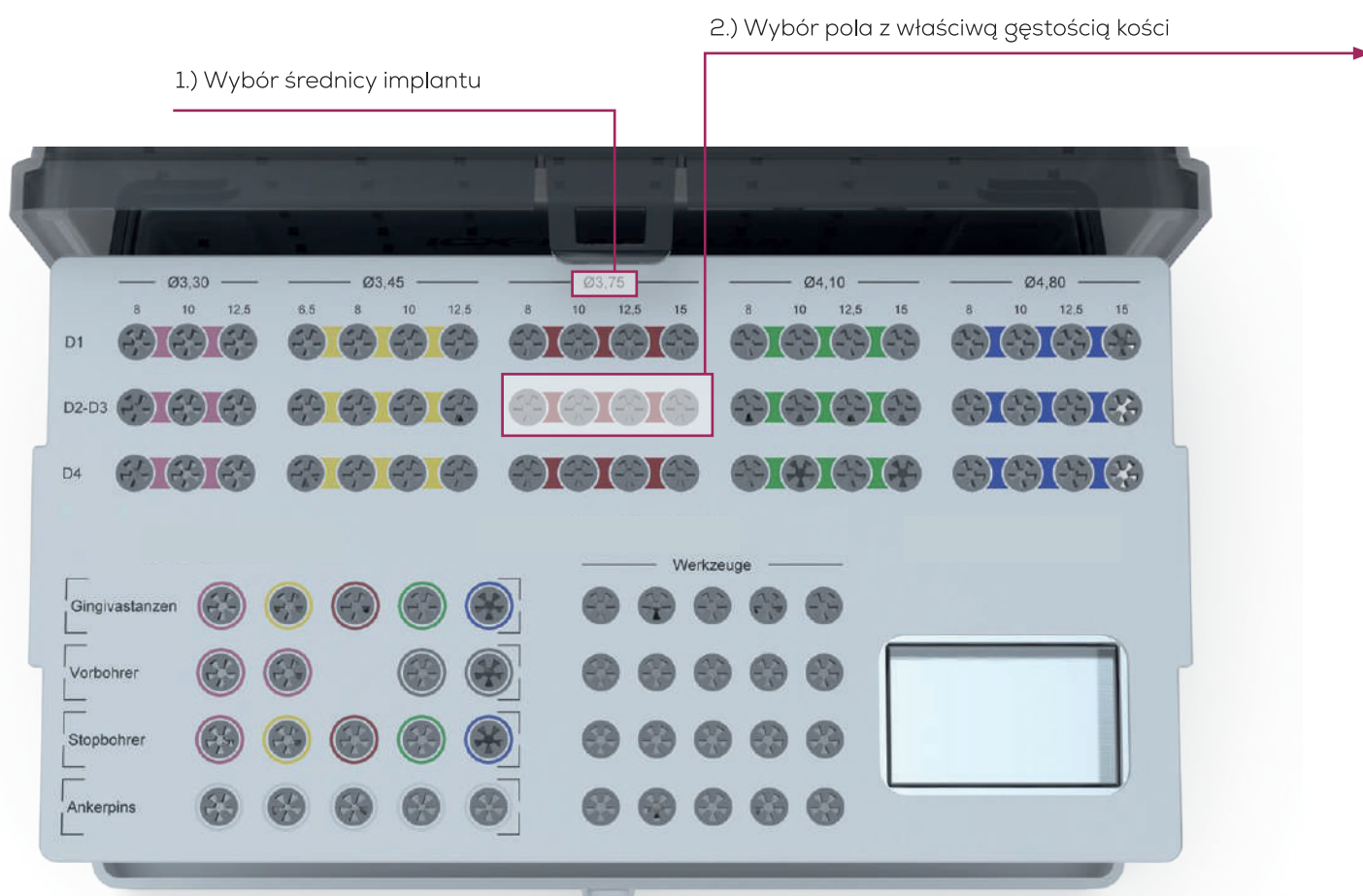

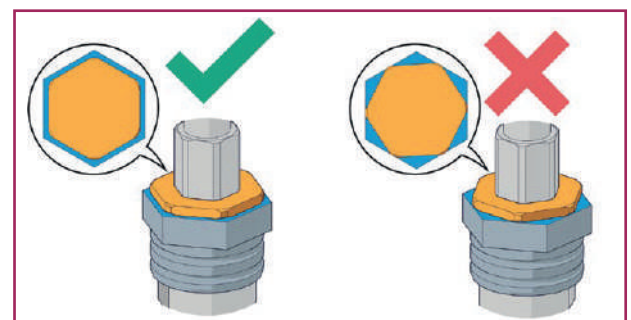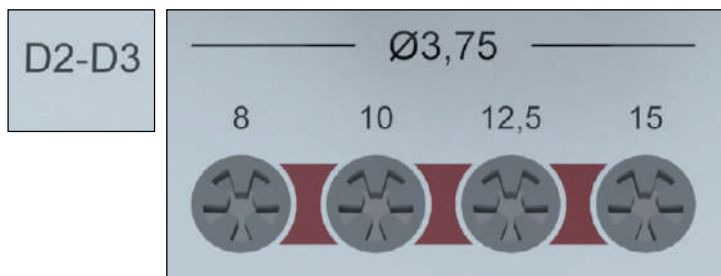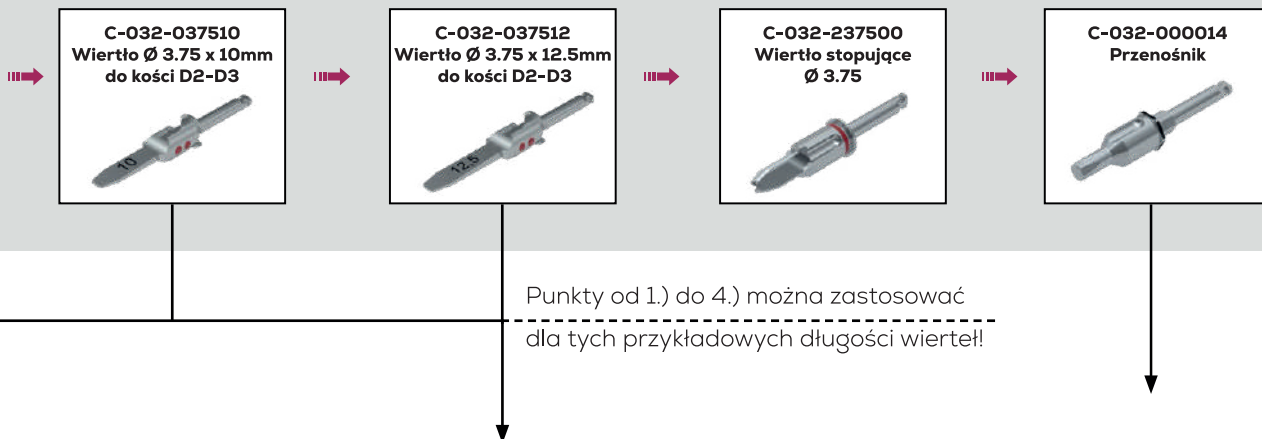

Ważna informacja:

W przypadku kątowych lub indywidualnych łączników zawsze ustawić przenośnik implantu równolegle do krawędzi tulei!

- 3) Rozpoczęcie wiercenia od najkrótszego wiertła. (8mm)
- 4) Kontynuacja każdym następnym wiertłem do osiągnięcia żądanej długości implantu (na przykładzie: 12,5 mm)

UWAGA: Wiertło stopujące jest absolutnie obowiązkowe i konieczne w ostatniej sekwencji wiercenia!

- 5) Wprowadzenie implantu: W przypadku implantów ICX wybierz narzędzie o indeksie: C-032-000014
W przypadku implantów ICX-Plus wybierz narzędzie o indeksie: C-032-000015
(Przenośnik implantu kompatybilny z ICX-Plus można rozpoznać po żółtym indeksie!)

Obroty wiertła:
wszystkie wiertła poza * NIEBIESKIMI 500 Obr./min. * NIEBIESKIE: 400 Obr./min.
* Sztanca: 15 Obr./min.

ICX-ALL-IN-ONE

– WIERTŁA CHIRURGICZNE

KASETA CHIRURGICZNA ICX-ALL-IN-ONE

Kompletna kasetka chirurgiczna zawierająca zestaw wiertel i narzędzi do przeprowadzenia zabiegów implanto-protetycznych systemu ICX, ICX-Narrow oraz ICX-Tissue. Innowacja wśród kaset. Zawiera specjalnie zaprojektowane wiertła chirurgiczne, które umożliwiają zarówno standardowe nawiercanie jak i zagęszczenie kości wokół łoża przy zastosowaniu wstecznych obrotów.




Wiertła posiadają wbudowane stopery uwzględniające subkrestalne pozycjonowanie implantu, a także poprzeczne krawędzie tnące dla szybszego przygotowania łoża bez przegrzewania kości.

**Wiertło
możemy używać
na dwa sposoby:**



Tryb Zagęszczania


Następuje, gdy wiertło obraca się odwrotnie do wskazówek zegara (50-150 obr./min).

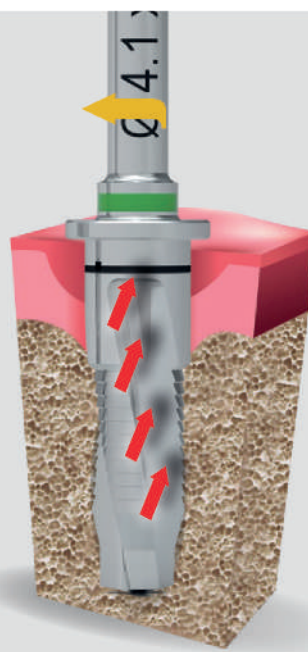

Tryb Cięcia


Następuje, kiedy wiertło kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (400-800 obr./min).

Protokół wiercenia dla
bardzo miękkiej / miękkiej / średnio twardej kości.

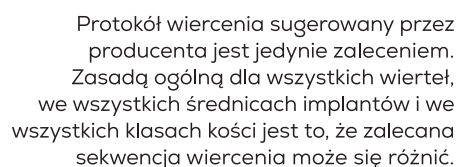

mięka kość - mniejsza ilość wiertel,
twarda kość - większa ilość wiertel.

Protokół wiercenia dla twardej kości.
Proszę używać tutaj tylko wiertel z 3 czerwonymi pierścieniami!

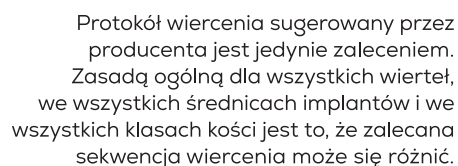

mięka kość – mniejsza ilość wiertel,
twarda kość – większa ilość wiertel.


ICX-Zero Bone Loss®

ICX-Zero Bone Loss® to linia produktów obejmująca indywidualne śruby gojące, łączniki oraz bazy tytanowe. Śruby gojące zostały specjalnie zaprojektowane dla zębów przednich, przedtrzonowców i trzonowców, optymalizując profil wyłaniania.



ICX-ZERO BONE LOSS® KORZYŚCI

Nowe łączniki ICX-ZERO BONE LOSS® charakteryzują się anatomicznie zoptymalizowanym profilem wyłaniania.

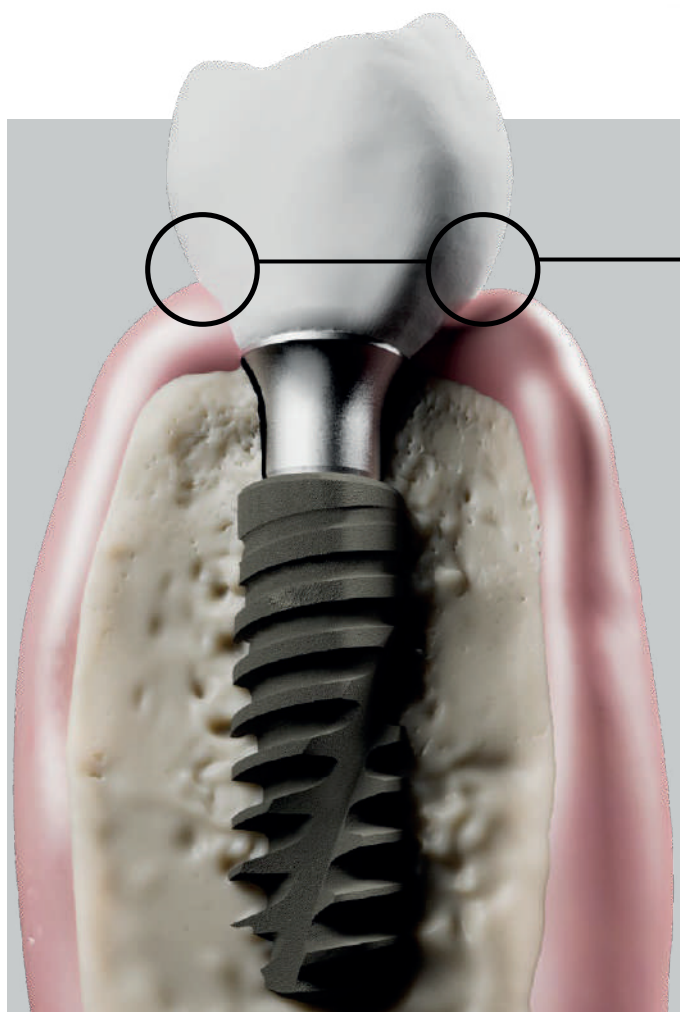

WAŻNA INFORMACJA!

Wysokość śruby gojącej oznaczana jest ilością rowków w jej górnej części. Dzięki nim technik dentystyczny dobiera wysokość przeddzgłową bazy tytanowej, więc skanowanie profilu wyłaniania nie jest konieczne.

1.5	2.5	3.5	
1.5	2.5	3.5	
1.5	2.5	3.5	

Zęby przednie




Przednie	Przedtrzonowe	Trzonowe
1.5 2.5 3.5	1.5 2.5 3.5	1.5 2.5 3.5

Nowe łączniki ICX-ZERO BONE LOSS® oferują szeroki zakres wysokości dziąsła dla obszarów przednich, przedtrzonowych i trzonowych.


PROTOKÓŁ CYFROWY

Zaznaczone obszary są wymagane do udanego **skanowania** śruby gojącej.

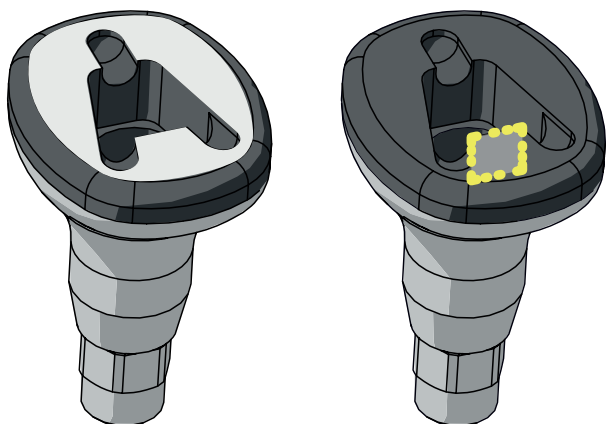


Komin protetyczny może być skracany z 6 do 5 lub 4 mm.



Baza danych zawiera pliki 3D dla skróconych modeli o wysokości 5 i 4 mm. Rowki o wysokości 2 i 3 mm zapewniają lepsze utrzymanie adhezyjne.

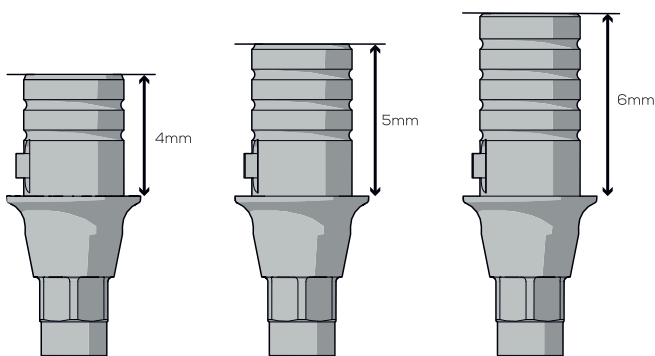

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie heksu implantu.

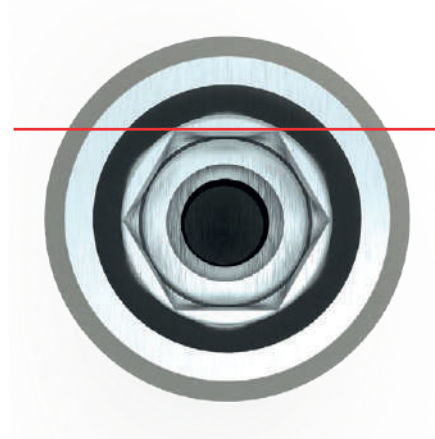

Splaszczona powierzchnia powinna zawsze być skierowana na stronę wargową.

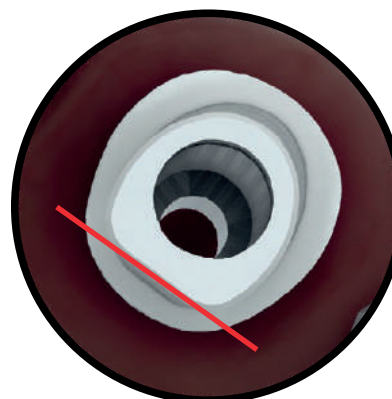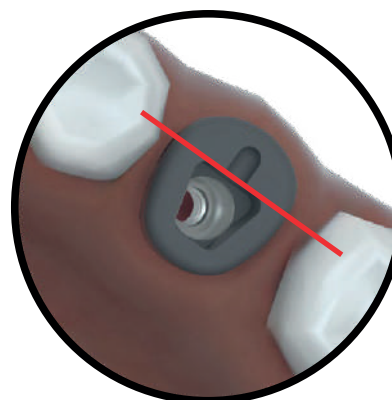




Bazy tytanowe z przekierowaniem kanału śruby

Rozwiązanie implantoprotetyczne niezbędne dla wysokoestetycznych prac przy niekorzystnym spójcyonowaniu implantu

Wklęsły profil wytłaniania zwiększający efekt platform switching

➡ 0-30st przekierowania

➡ możliwość skracania ukośnie i pionowo


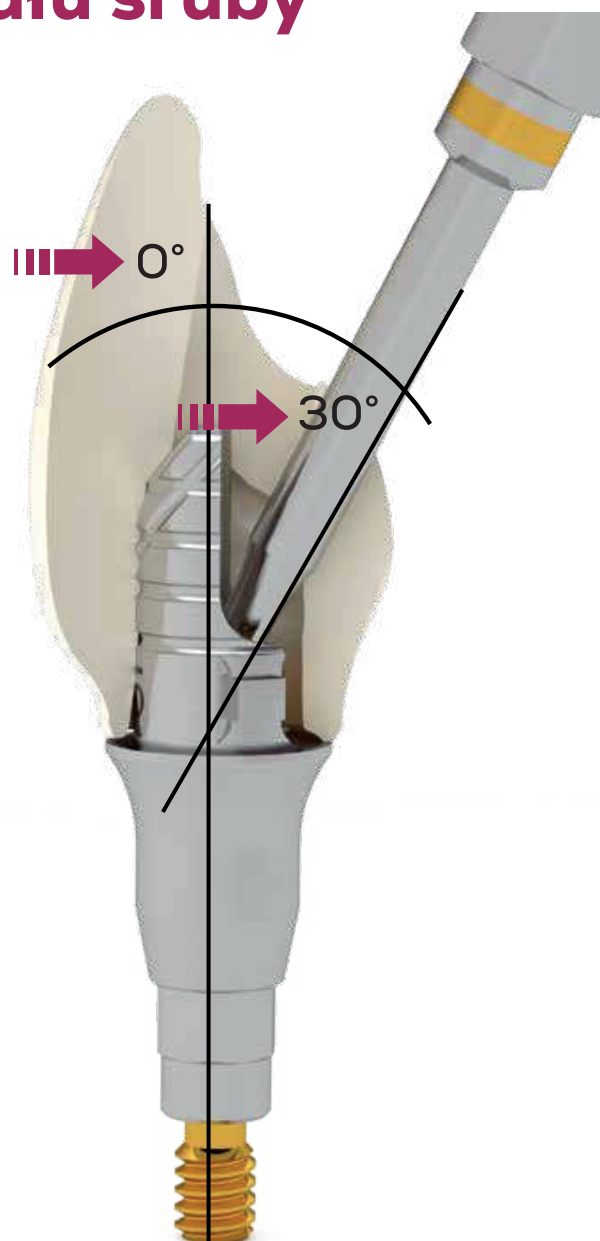


ONE VISION – BE SMART. BE ICX.

medentis
medical



pobierz biblioteki
CAD/CAM

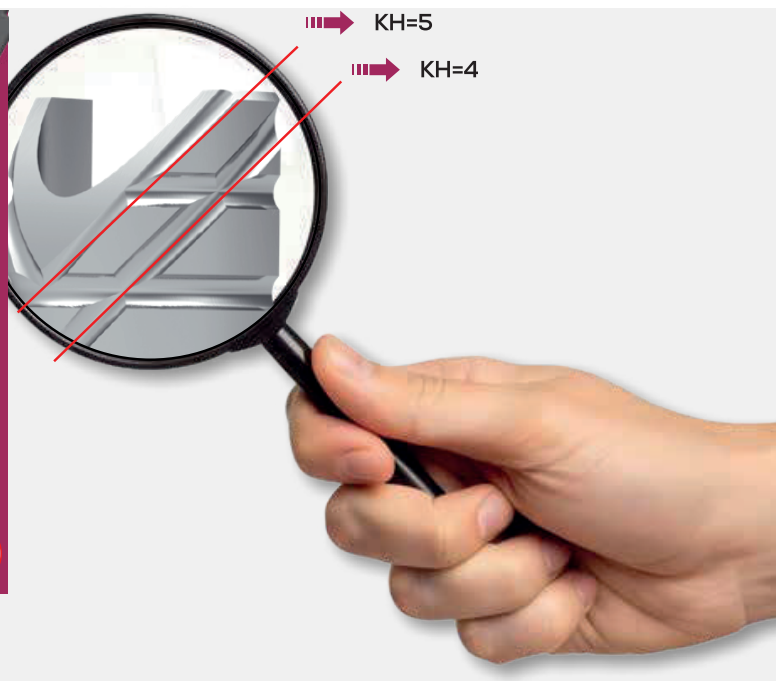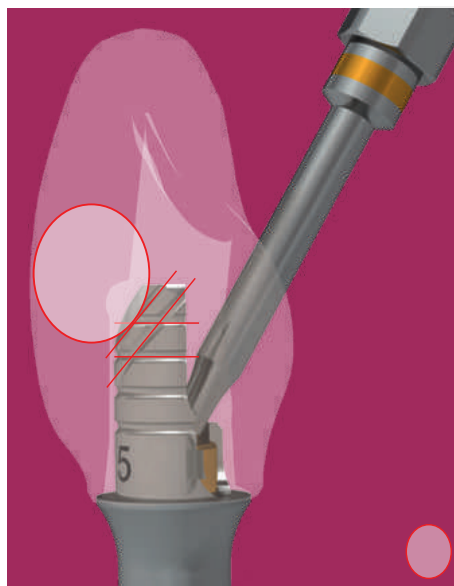


0-30st przekierowania

możliwość skracania ukośnie i pionowo

C-029-011102	GH=0.5mm	hex
C-029-011107	GH=1.5mm	
C-029-011108	GH=2.5mm	
C-029-011109	GH=3.5mm	
C-029-011104	GH=4.5mm	
C-029-011105	GH=5.5mm	
C-029-011002	GH=0.5mm	non hex
C-029-011007	GH=1.5mm	
C-029-011008	GH=2.5mm	
C-029-011009	GH=3.5mm	
C-029-011004	GH=4.5mm	
C-029-011005	GH=5.5mm	
C-029-201102	GH=0.5mm; K=10mm	hex non hex
C-029-201002	GH=0.5mm; K=10mm	
C-015-100050	krótkie	
C-015-100051	średnie	
C-015-100052	długie	



Zaokrąglony śrubokręt typu TORX
umożliwia dokręcenie śruby
pod kątem do 30stopni

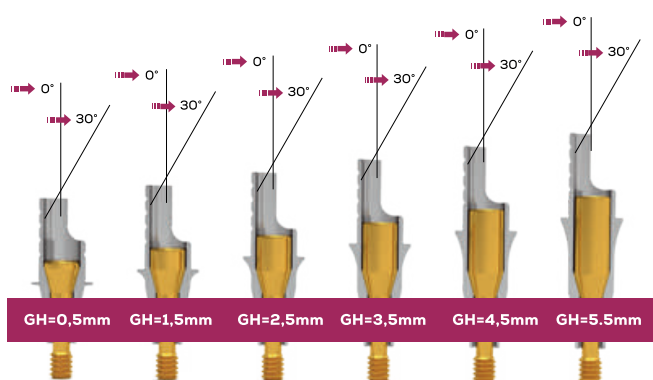

Rozwiązanie dla wszystkich średnic implantów ICX (3.30mm, 3.45mm, 3.75mm, 4.1mm, 4.8mm)

ONE VISION – BE SMART. BE ICX.

medentis[®]
medical

ICX

THE FAIR
IMPLANT
SYSTEM



Nowe łączniki ICX-MULTI Delta

Unikalne rozwiązanie typu ONE-TIME
do pojedynczych koron, mostów oraz pełnych łuków



ZALETY SYSTEMU ICX-MULTI DELTA

- Jedno połączenie dla niemal wszystkich zastosowań
- Łączniki proste 0° w 6 wysokościach przezsłuzówkowych
- Łączniki kątowe 17° i 35°
- Możliwość zastosowania zarówno w pojedynczych uzupełnieniach protetycznych z ochroną przeciwwrotacyjną, jak i w pracach wielopunktowych bez zabezpieczenia przeciwwrotacyjnego
- Nowoczesna, smukła konstrukcja
- Zmniejszona średnica z 4,8 mm do 4,2 mm

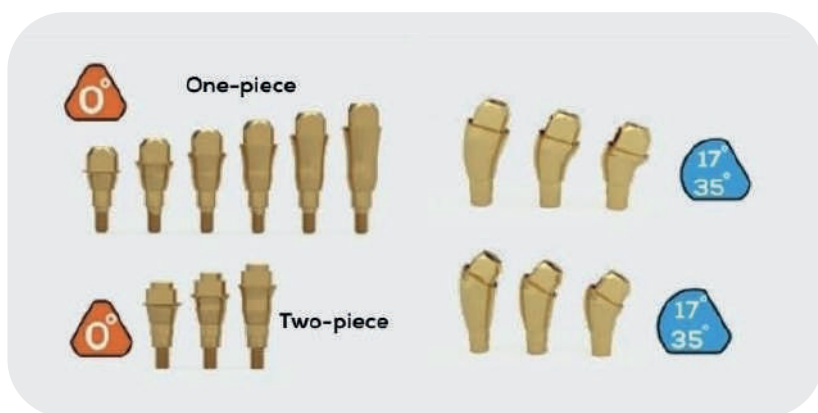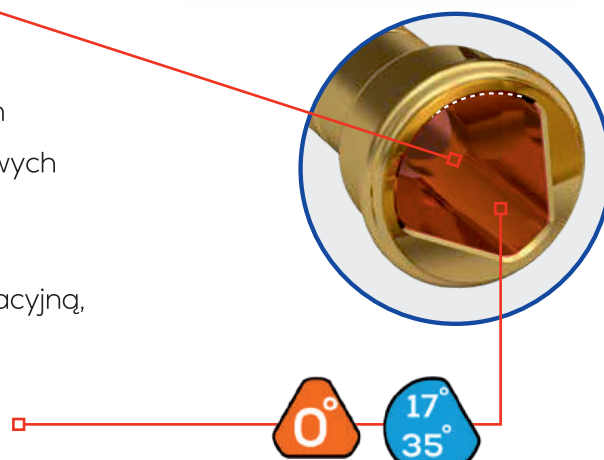

Rozwiązanie dla wszystkich średnic implantów
ICX (3.30mm, 3.45mm, 3.75mm, 4.1mm, 4.8mm)

ONE VISION – BE SMART. BE ICX.

medentis[®]
medical



ICX-Multi Delta to rozwiązanie typu one-time, które umożliwia wykonywanie pojedynczych punktów protetycznych dzięki antyrotacji, oraz mostów i pełnych łuków.

Po wprowadzeniu implantu należy dobrać prosty lub kątowy łącznik, który pozostaje na stałe w implantancie, a gojenie i skan lub tradycyjny wycisk odbywa się z jego poziomu.



z zabezpieczeniem przeciwrrotacyjnym

- ➡ Szybsze gojenie
- ➡ Zwiększony platform switching
- ➡ Brak podrażniania tkanek w pobliżu implantu
- ➡ Łatwiejsze pobieranie wycisku/skanu
- ➡ Łatwość serwisu i oczyszczania
- ➡ Najwyższa estetyka
- ➡ Szeroki stożek platformy ułatwiający insercję odbudów protetycznych

z zabezpieczeniem przeciwrrotacyjnym



bez zabezpieczenia przeciwrrotacyjnego



CYFROWO WSPOMAGANY PROTOKÓŁ PRACY Z WYKORZYSTANIEM SKANERA WEWNĄTRZYSTEGO

W przypadku zastosowania cyfrowego protokołu pracy, przed wykonaniem ostatecznego uzupełnienia protetycznego można zastosować specjalnie skonfigurowaną śrubę gojącą ICX-Multi Delta, umożliwiającą rejestrację danych wewnątrzustnych.



ONE VISION – BE SMART. BE ICX.

medentis
medical

ICX-multi®

Koncepcja ICX-multi® jest optymalnym rozwiązaniem do wielopunktowych prac przykręcanych typu ALL-ON-X.

Duży wybór wysokości (1 – 5 mm) oraz kątowości multiunitów (0°, 17°, 35°, 50°) umożliwia uzyskanie wystarczającej równoległości osi protetycznych w sytuacji bardzo mocno pochylonych implantów.


Szerokie portfolio komponentów protetycznych do zastosowania z poziomymi multiunitami umożliwia wykonanie każdego typu prac protetycznych zarówno wytwarzanych standardowo i cyfrowo.

Multiunity proste należy przykręcać do implantów z siłą do 30N/cm, a stałe uzupełnienia protetyczne do multiunitów z siłą do 27N/cm.





Zalety rozwiązania ICX-multi® 4-ON-ICX w żuchwie:

- 4 implanty umieszczone pomiędzy otworami bródkowymi,
- brak konieczności dodatkowych pomiarów położenia kanału nerwowego czy kosztów związanych z relokacją nerwu żębodołowego rzuchwy,
- zmniejszone ryzyko rozcementowania lub poluzowania się prac na dystalnych łącznikach, dzięki umiejscowieniu przykręcanych łączników protetycznych poza strefą ruchów skrętnych żuchwy,
- odbudowa protetyczna na stałym, niezdejmowanym moście,
- dużo niższy koszt materiałów.

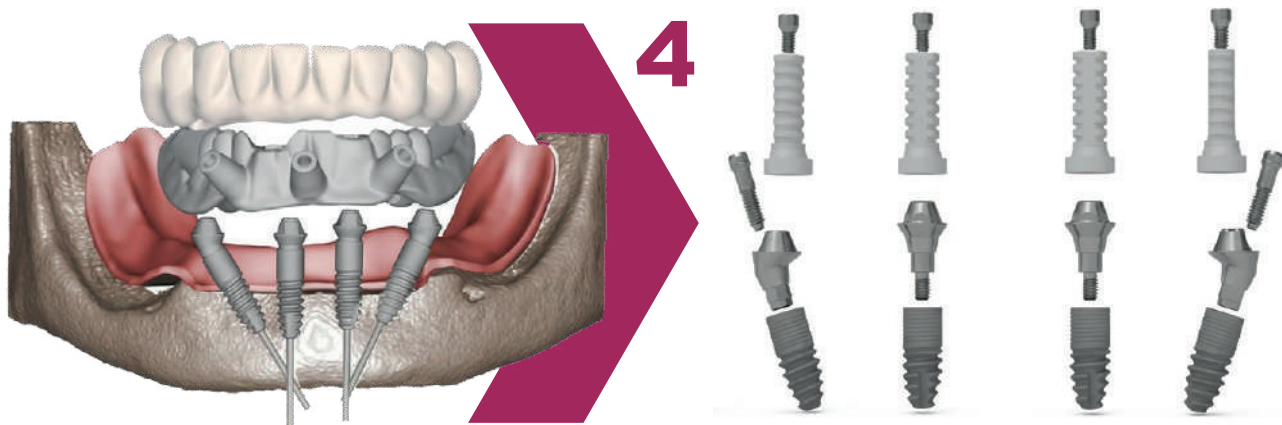

Zalety rozwiązania ICX-multi® 6-ON-ICX w szczęcie:

- 6 implantów – projekt „podkowy” z pozostawionym odkrytym podniebieniem, znacznie zwiększającym komfort pacjenta,
- możliwość uniknięcia zabiegu sinus lift, dzięki umieszczeniu implantów pod kątem,
- znaczne skrócenie czasu leczenia pacjenta.

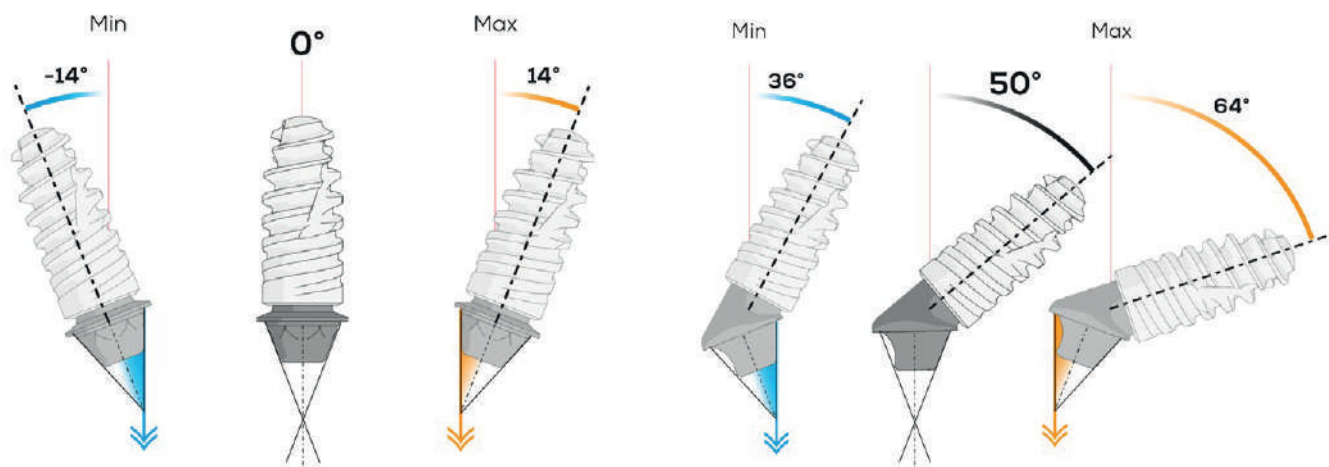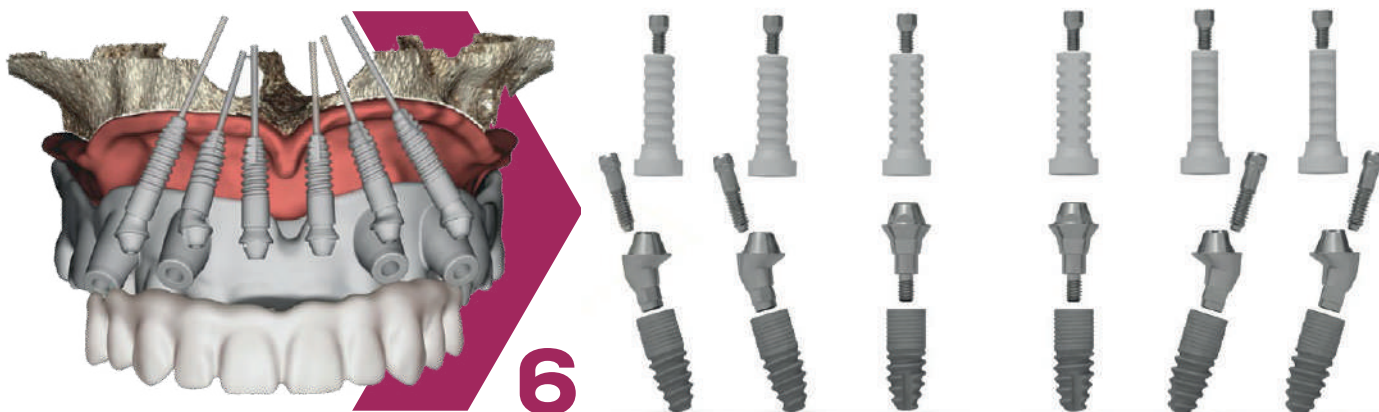



ICX-MINI


Implant Ø 2.9 mm

Implanty dwuczęściowe, przeznaczone do stabilizacji ruchomych rozwiązań protetycznych.

Po zdemontowaniu łącznika kulowego, możliwe jest zastosowanie systemu LOCATOR™ (ICX-Maximus) lub w cementowanie specjalnej czapeczki protetycznej do osadzania pojedynczych koron.

Implant ICX-MINI
- kolor biały, **Ø 2,9mm**

ICX-MINI Ø 2,9 x 8mm
ICX-MINI Ø 2,9 x 10mm
ICX-MINI Ø 2,9 x 12,5mm

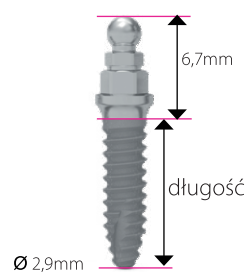

Przenośnik implantu:



Klucz kontrolny do demontażu
łącznika kulowego:



Przenośnik łącznika kulowego:



Śrubokręt typu hex: 960002
Do śrub zamykających



Przegląd elementów protetycznych **ICX-MINI** Ø 2,9mm

Opis produktu



ICX-MINI śruba zamykająca (sprawdzić uwagę poniżej!) Do przykręcania służy klucz nr 960002



t-bona łącznik kulowy MINI, Ø 2.25mm, łącznik w zestawie zawiera analog

t-bona łącznik kulowy MINI, Ø 2.25mm, łącznik w zestawie zawiera analog

t-bona łącznik kulowy MINI, Ø 2.25mm, łącznik w zestawie zawiera analog



ICX-MINI łącznik lity

(Lita czapeczka jest zacementowana w ustach pacjenta. Łącznik po zacementowaniu może być frezowany i konwencjonalnie pobrany z niego wycisk do laboratorium).

Nie należy przekraczać momentu dokręcania od 5 do 10 Ncm. Wszystkie śruby zamykające ICX-mini należy dokręcać wyłącznie ręcznie. Jeśli śruba zostanie zakręcona z siłą 20 Ncm lub więcej, istnieje ryzyko, że powstaną siły stożkowe, które uniemożliwią ich późniejsze odkręcenie.

ICX Maximus łącznik typu Locator™ ICX-MINI Ø 2.9mm*

Opis produktu



ICX-Maximus dla implantu ICX-MINI, zawiera tuleję o wys. GH 3mm oraz śrubę łączącą

* Dwuczęściowy łącznik ICX Maximus jest autorskim opracowaniem firmy Medentis Medical i jest kompatybilny z matrycami LOCATOR™.

Overdenture – stabilna odbudowa ruchoma oparta na implantach

ICX oferuje kompleksowe rozwiązania implantoprotetyczne typu overdenture, przeznaczone dla pacjentów z bezzębiem częściowym lub całkowitym, u których priorytetem jest poprawa retencji, stabilności i funkcji protezy, przy jednoczesnym ograniczeniu zakresu leczenia chirurgicznego.



W systemie ICX overdenture może być oparte na:

- 2 implantach – najczęściej w żuchwie (rozwiązanie minimalne),
- 3–4 implantach – zwiększona stabilność i równomierny rozkład sił,
- implantach standardowych lub miniimplantach ICX, w zależności od warunków kostnych.

Overdenture ICX to rozwiązanie, które dzięki łatwości oczyszczania łączy biologiczne bezpieczeństwo i funkcjonalność.



Praktyczna implantologia oparta na wiedzy, doświadczeniu i realnych efektach klinicznych



NASZA OFERTA SZKOLEŃ IMPLANTOLOGICZNYCH

Wprowadzenie do implantologii

Szkolenia dedykowane lekarzom rozpoczynającym swoją drogę w implantologii. Uczestnicy zdobywają solidne podstawy teoretyczne oraz praktyczne, obejmujące:

- biologiczne podstawy implantologii,
- planowanie leczenia implantologicznego,
- zasady doboru implantów i komponentów,
- bezpieczeństwo zabiegów i najczęstsze błędy początkujących.

To idealny pierwszy krok do samodzielnej pracy implantologicznej.



Kursy grupowe z warsztatami praktycznymi

Intensywne szkolenia warsztatowe:

- na preparatach zwierzęcych,
- z pełnym zapleczem instrumentarium,
- pod bezpośrednim nadzorem doświadczonych instruktorów.

Uczestnicy ćwiczą techniki chirurgiczne, nabywając pewności i precyzji niezbędnej w codziennej praktyce klinicznej.



Szkolenia indywidualne – zabiegi w gabinecie

Najbardziej spersonalizowana forma nauki. Szkolenia indywidualne obejmują:

- udział w rzeczywistych zabiegach implantologicznych,
- pracę z pacjentami w gabinecie,
- indywidualne wsparcie eksperta na każdym etapie leczenia.

Forma polecana lekarzom, którzy chcą szybko i bezpiecznie wdrożyć implantologię do własnej praktyki.



Diagnostyka w implantologii

Szkolenia poświęcone prawidłowej diagnostyce i planowaniu leczenia, w tym:

- analiza przypadków klinicznych,
- interpretacja badań obrazowych,
- planowanie implantologiczne krok po kroku,
- kwalifikacja pacjenta do leczenia implantologicznego.

Solidna diagnostyka to fundament przewidywalnych i długoterminowych efektów leczenia.



Szablony implantologiczne

Nowoczesne szkolenia z zakresu planowania cyfrowego i zastosowania szablonów implantologicznych, obejmujące:

- planowanie pozycji implantów,
- pracę z szablonami chirurgicznymi,
- zwiększenie precyzji i bezpieczeństwa zabiegów,
- optymalizację czasu pracy w gabinecie.



Zaawansowane szkolenia Full Arch

Programy dla lekarzy poszukujących rozwiązań w kompleksowym leczeniu bezzębia i przypadków zaawansowanych. Szkolenia obejmują:

- leczenie full arch,
- kompleksowe leczenie implantoprotetyczne,
- pracę w oparciu o system WeldOne,
- natychmiastowe obciążenie implantów,
- zaawansowane protokoły chirurgiczno-protetyczne.

To szkolenia dla tych, którzy chcą oferować pacjentom nowoczesne, kompleksowe rozwiązania na najwyższym poziomie.



DLACZEGO AKADEMIA 3Z?

- **Znani wykładowcy i eksperci** – praktycy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym
- **Punkty edukacyjne i certyfikaty** potwierdzające udział w szkoleniach
- **Atrakcyjne ceny**, szkolenia również w formie dodatku do pakietów ICX
- **Szkolenia dedykowane użytkownikom systemu ICX**
- **Wysoki poziom organizacji** – sprawna logistyka, komfortowe warunki, wsparcie uczestników
- **Nacisk na praktykę** i realne umiejętności przydatne w codziennej pracy

**SPRAWDŹ
TERMINARZ KURSÓW**



akademia.3z.pl



Medical Smart
Solutions

Wyłączny dystrybutor
systemu implantologicznego ICX w Polsce:

3Z Sp. z o.o.

ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie

Tel.: **+48 32 767 70 70 +48 32 767 55 66**

E-mail: **zamowienia@3z.pl**

icx.com.pl

sklep.3z.pl